

gingifast



THE BEAUTY KING

Technical

A-Silicone for Gingival Mask

Zhermack[®]

TECHNICAL



gingifast elastic

Эстетичная натуральность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Использование поливинилсилоксана с системой **автоматического смешивания** для **имитации десны** на модели позволяет **за короткий срок** получить правильную морфологию при проектировании несъемного протеза.

ЭСТЕТИКА

GINGIFAST ELASTIC позволяет получить **эстетический результат** благодаря своей **полупрозрачности** и наличию васкулярных прожилок, придающих ему натуральный вид.



1 Мастер-модель с матричным оттиском из Zetalabor



2 Нанесение сепаратора *Gingifast Separator* на матрицу из Zetalabor



3 Участок мастер-модели, обработанный для нанесения *Gingifast Elastic*



4 Установка матрицы из Zetalabor на модель и введение *Gingifast Elastic*



5 Фрагмент десневой маски после окончательной обработки



6 Готовая работа на мастер-модели



gingifast rigid

Универсальный и удобный при фрезеровке.

ПРИМЕНЕНИЕ

Имитация десны, используемая в **имплантологии**, воспроизводит состояние десневой ткани для определения формы пришеечного контура и нижней кромки протеза.

ТВЕРДОСТЬ

Сбалансированная твердость облегчает **фрезеровку** краев во время финишной обработки десневой маски на модели.




1 Подготовка оттиска



2 Нанесение сепаратора *Gingifast Separator* на оттиск



3 Фрагмент носика канюли, погруженного в материал во время выдавливания

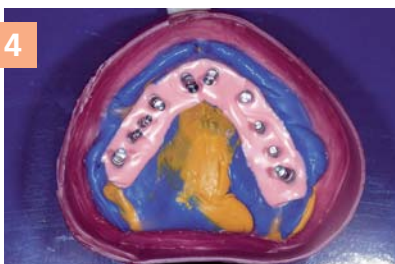

4 Оттиск, подготовленный для отливки модели



5 Фрагмент воспроизведенной десны



6 Простота фрезеровки



Упаковка

C401500 GINGIFAST ELASTIC	2 x картриджи 50 мл + 12 желтых смесительных наконечников + 12 желтых интраоральных канюль + 1 x Separator 10 мл + 1 сепаратор
C401520 GINGIFAST RIGID	2 x картриджи 50 мл + 12 желтых смесительных наконечников + 12 желтых интраоральных канюль + 1 x Separator 10 мл + 1 сепаратор

Аксессуары

C202100 DISPENSER D2	Диспенсер D2 - 1:1
U100210 плунжер	Зубчатая рейка для диспенсера D2 - 1:1
C202070 MIXING TIPS SMALL	48 желтых смесительных наконечников
C202090 ORAL TIPS	48 желтых интраоральных канюль
C400887 SEPARATOR FOR GINGIFAST	1 x Separator 10 мл

Branch
Zhermack GmbH Deutschland
 Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
 Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
 Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
 info@zhermack.de
 www.zhermack.com

Branch
Zhermapol Sp. z o.o
 ul. Augustówka 14
 02 - 981 Warszawa - Polska
 Tel. +48 - 22 858 82 72 - 858 73 41
 Fax +48 - 22 642 07 14
 zhermapol@zhermapol.pl
 www.zhermack.com

Branch
Zhermack Inc.
 151 Industrial Way East Bldg B
 Eatontown, NJ 07724
 Phone +1 - 732 389 8540
 Fax +1 - 732 389 8543
 info.usa@zhermack.com
 www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack UK and Ireland
 21 Balmoral Road
 Melton Mowbray - Leics.
 LE13 1JN
 Tel. +44 - (0)7870 690811
 uk@zhermack.com
 www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack Russia
 5/2 Marshala Vasilevskogo St.
 123098 Moscow - Russia
 Tel. +7 916 9301191
 info.russia@zhermack.com
 www.zhermack.com

Zhermack SpA
 Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
 Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com